

IDEXX VetLab* UA* 分析仪

快速参考指南


分析样本

1. 在 IDEXX VetLab* Station 上启动样本检测（有关更多信息，请参见 *IDEXX VetLab Station 操作指南*）。
2. 确认“选择仪器”屏幕上的患宠信息后，选择 **UA 分析仪** 图标，以及手动 UA 图标（如果需要），然后点击**检测**。
3. 确认 UA 分析仪 LED 状态指示灯闪烁绿色，表示已接收到患宠信息。
4. 按照以下步骤将样本加到 IDEXX UA 试纸条上（请勿使用其他品牌的试纸条）：
 - a. 使用未经离心处理的新鲜尿液。充分混匀尿液样本。样本在进行检测时温度应与室温接近且放置时间不应超过一小时。
 - b. 使用移液管将尿液样本滴加到试纸条上并浸润试纸条，确保所有检测片均已湿润。不要弯折试纸条。




注意：不建议将试纸条浸入尿液容器中，因为试纸条可能会弯曲，导致检测样本时出错。

- c. 依次将试纸条的侧边和背面在吸水纸（如纸巾）上快速（1-2 秒）轻擦一下。

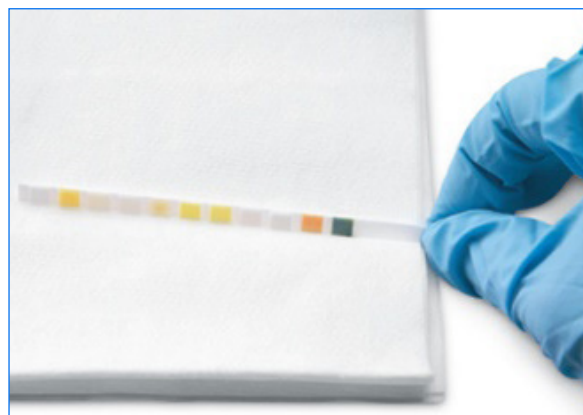

5. 将试纸条立即放在试纸检测架上（检测片朝上），使其前缘被插槽处的夹子牢牢夹紧。固定杆必须处于抬起状态。

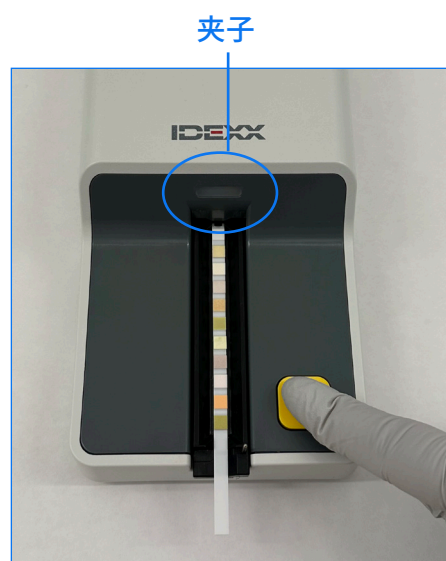

6. 按下**启动**按钮。检测架会微微前移，固定杆会落下。
7. 运行完成后，取出并处置试纸条。用无绒布将检测架上的尿液残留擦拭干净。

清洁试纸检测架

每天清洁试纸检测架，以防可能因尿液残留而导致出错。

1. 在 IDEXX VetLab Station 的仪器屏幕上选择**关闭 UA 分析仪**。
2. 从分析仪中拉取出试纸检测架。
3. 如果试纸检测架某些部分被污染，请在流动的水下冲洗，然后用 70% 的异丙醇清洁（如有必要）。特别是一些轻微结晶沉积影响固定杆开合或者试纸检测架底部齿轮正常运转，可以用软刷清除。用无绒布擦干检测架。

重要提示：在清洁过程中注意请勿损坏灰色参考片，并确保其完全清洁、干燥且正确就位，然后再读取试纸条。



4. 使固定杆靠近自己一侧，并将检测架插入 LED 状态指示灯下方的凹槽，从而让检测架的边缘与分析仪的边缘齐平。
5. 按下右侧的电源按钮开启 UA 分析仪。自检将自动开始，验证参考片是否状况良好。如果自检未自动开始，IDEXX VetLab* Station 上会出现一条通知。

校准分析仪

IDEXX VetLab* UA* 分析仪应每 7 天重新校准一次。

1. 确保试纸检测架清洁干燥。
2. 在 IDEXX VetLab Station 主屏幕上，点击 **UA 分析仪** 图标（或点击**仪器**，然后点击 **UA 分析仪**）。
3. 点击**校准**，然后点击**执行校准**。
4. 当分析仪 LED 状态指示灯绿色快闪时，将新的 IDEXX VetLab* UA* 校准条放到检测架上，检测片朝上，使校准条前缘被插槽前端的夹子夹紧。固定杆必须处于抬起状态。
5. 按下**启动**按钮。

重要提示：

- + 注意不要触摸校准条上的检测片，也不要让检测片接触到尿液或其他液体。
- + 仅 IDEXX VetLab UA 校准条可以与 IDEXX VetLab UA 分析仪搭配使用。

检测架微微前移，固定杆落下，分析仪将读取灰色参考片和校准片。之后，检测架返回到其起始位置，试纸条固定杆抬起。

校准结果将显示在 IDEXX VetLab Station 上，指示通过或失败。如果校准过程失败，请参见 *IDEXX VetLab UA 分析仪操作指南* 获取故障排除信息，或致电 IDEXX 客户服务和技术支持部门。

6. 取出并处置校准条。每个校准条应仅限使用一次。

IDEXX 客户服务和技术支持

中国 400-678-6682