


# 结果判读说明

Catalyst™ 皮质醇检测提供的结果判读可帮助您为患宠制定最佳后续诊疗方案。为充分利用这一重要信息，请先思考以下问题，然后按步骤操作：

- + 是否需要为同一患宠进行多次皮质醇检测？如答案为“是”，且您已进行过初始皮质醇检测，请遵循“追加检测……”部分的说明操作，以确保每次的定量结果可按顺序分组，并获取**全面的结果判读**。
- + 是否已输入检测方案信息？为获得针对结果的判读，您必须为患宠的检测选择正确的检测方案及方案步骤——请务必遵循以下针对您所用分析仪的特定工作流程进行操作：

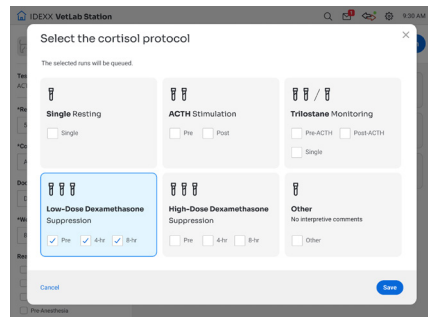

### 初始皮质醇检测

#### Catalyst One™ 生化分析仪



在 IDEXX VetLab™ Station 上启动检测。在“选择仪器”界面，点击“**Catalyst One**”，然后点击“**皮质醇**”。选择所需的检测方案及其追加检测方案步骤，点击“**保存**”，然后点击“**运行**”。

### 追加检测/多步骤皮质醇检测

在初始检测时选择的所有方案步骤均会显示在 IDEXX VetLab Station 首页的“进行中”列表内。当需要处理下一个样本时，请点击列表中下一个待测项，点击“**已排队**”，然后点击“**开始运行**”。

#### Catalyst Dx™ 生化分析仪



按照您在 IDEXX VetLab Station 上的常规操作启动检测。运行结束后，根据提示确认检测方案及方案步骤，然后点击“**提交**”。

**注意：**如果您选择稍后输入检测方案/方案步骤，请点击“进行中”列表中的患宠，点击“**添加详情**”，然后选择患宠的检测方案信息。

为确保追加检测结果和初始检测结果归为一组，并获取结果判读：

1. 在 IDEXX VetLab Station 上找到患宠的初始皮质醇检测结果，或从首页“待测样本”列表中选择相应患宠。
2. 点击“**添加检测**”，然后点选“**追加结果**”。
3. 在“选择仪器”界面，选择“**Catalyst Dx**”。
4. 运行结束时，根据提示选择本次运行的检测方案信息，然后点击“**提交**”。

**重要提示：**如果您同时配备 Catalyst One 和 Catalyst Dx 分析仪，且需对患宠的皮质醇检测结果进行趋势分析，和/或开展追加检测/多步骤皮质醇检测，IDEXX 建议所有皮质醇检测均使用同一台分析仪，并采用相同类型的样本进行操作。

### 要查看定量结果和结果判读：

点击 IDEXX VetLab Station 左下角的消息，显示患宠的检测结果已就绪。当追加检测添加为多步骤皮质醇检测的组成部分时，结果列表将按时间倒序显示（最新追加检测结果位于列表顶部，初始检测结果置于底部），全面的结果判读随最新结果显示。