


快速参考指南

注意：有关使用Catalyst One*生化分析仪的详细说明，请参阅《IDEXX Catalyst One*生化分析仪操作指南》。

Catalyst One*分析仪组件

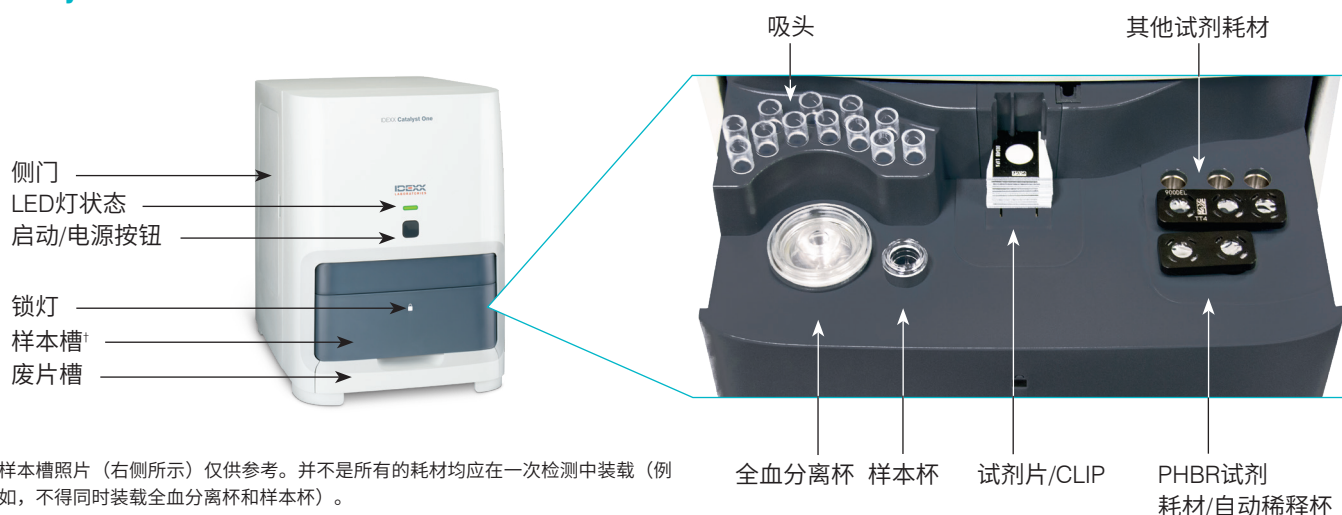

*样本槽照片（右侧所示）仅供参考。并不是所有的耗材均应在一次检测中装载（例如，不得同时装载全血分离杯和样本杯）。

所需样本量



*检测Chem 17 CLIP和电解质时，建议样本量为300 µL。

检测样本

1. 在IDEXX VetLab* Station上输入样本信息。
2. 将试剂片和样本装入样本槽中。
3. 关闭样本槽，按下分析仪上的启动按钮。

稀释

Catalyst One分析仪支持自动稀释（分析仪为您混合样本和稀释液）和手动稀释（需要您在分析仪外完成稀释）。**请勿稀释正在进行氨、苯巴比妥、果糖胺、总T₄、SDMA、孕酮、胆汁酸或电解质检测的样本。**

检测质控品

1. 点击IDEXX VetLab Station主屏幕上的**Catalyst One**图标。
2. 点击**维护**，然后点击**质控品**。
3. 点击您正在使用的质控品批号，然后点击**检测质控品**。
4. 根据屏幕说明制备和检测质控品。

清洁内部组件（每月一次）

1. 点击IDEXX VetLab Station主屏幕上的**Catalyst One**图标。
2. 点击**维护**，点击**Clean**（清洁），并根据屏幕说明进行操作。
 - a. 打开分析仪侧门。
 - b. 提起转盘盖，直到绿色把手磁吸到分析仪内部的磁铁上。
 - c. 取下转盘。
 - d. 使用IDEXX支持的酒精棉片擦拭孵育环和光学窗口。
 - e. 清洁转盘上的白色参考片。
 - f. 使用干燥的光学纸巾擦干光学窗口和参考片。
 - g. 放回转盘，盖上转盘盖，直到其卡紧，关闭侧门。
 - h. 点击**Done**（完成）。

