

IDEXX VetLab* UA* 分析仪

快速参考指南

读取 IDEXX UA* 试纸条


使用未经离心处理的新鲜尿液。充分混匀尿液样本。样本在进行检测时温度应与室温接近，且放置时间未超过一小时。
有关更多说明，请参阅 IDEXX VetLab* UA* 分析仪操作指南。

夹子




- 1 使用移液管将尿液样本滴加到 UA 试纸条上并浸润试纸条，确保所有检测片均已湿润。不要弯折试纸条。


重要提示: 仅 IDEXX UA 试纸条可以与 IDEXX VetLab UA 分析仪搭配使用。请勿使用任何其他品牌的试纸条。

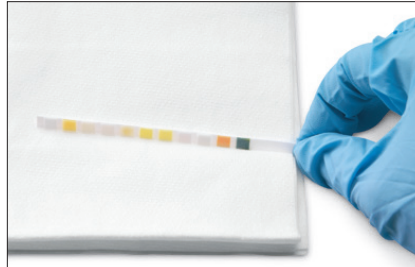

- 2 依次将试纸条的侧边和背面在吸水纸(如纸巾)上快速(大约一秒钟)轻擦一下。

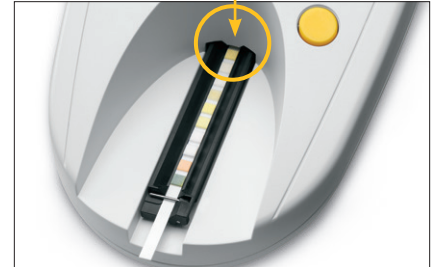

- 3 将试纸条放在试纸检测架上(检测片朝上)，使其前缘被插槽处的夹子夹紧。固定杆必须处于抬起状态。试纸条必须有大约 2 毫米夹在夹子下。

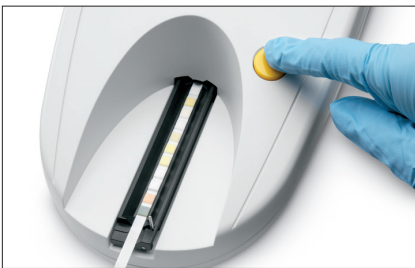

- 4 按 **开始** 按钮。会响起蜂鸣声。检测架稍微向前移动，固定杆落下。

试纸检测架会自动将试纸条带入分析仪进行读取，然后再使其返回到初始位置。在分析仪返回到准备测量模式之前，不要取出试纸条。从按下开始按钮到所有测量均完成大约需要 80 秒。



- 5 打印结果后，取出并处置试纸条。用无绒布将检测架上的尿液残留擦干净。

注意: 如果 UA 分析仪已连接到 IDEXX VetLab Station，则会自动传输检测结果。

IDEXX 技术支持部

中国 400-678-6682